



DANISH
DESIGN
- MADE IN
DENMARK

A FLEXIBILIS, EGYEDI
TERVEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN
A FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
HATÉKONY PARTNERRÉ
ALAKÍTHATÓ




A MINŐSÉG NEM
EGY FIGYELEMBE
VEHETŐ SZEMPONT
A MINŐSÉG MAGA
A MEGOLDÁS



UnicLine
- FEEL THE DIFFERENCE

TELJESKÖRŰ VEZÉRLÉS - LÁBBAL


Az egyedülálló, különleges, kör alakú lábkapcsoló minden fix munkapozícióból, minden irányból aktiválható mind jobb, mind bal lábbal. A lábkapcsolóval szabályozható a kiválasztott műszer sebessége és intenzitása. A lábkapcsoló középső gyűrűjével a spray funkció választható ki, általa az erőteljes, mechanikus fúvóka aktiválható, vagy elforgatásával a mikromotor beállítható. A program 3 fokozatot kínál a mikromotor sebességre, vagy az ultrahang rezgésekre vonatkozóan. A lábkapcsoló tetejével a lámpa és az asszisztens hívó aktiválható. A UnicLine kapható hagyományos módon állítható lábkontrollal is.

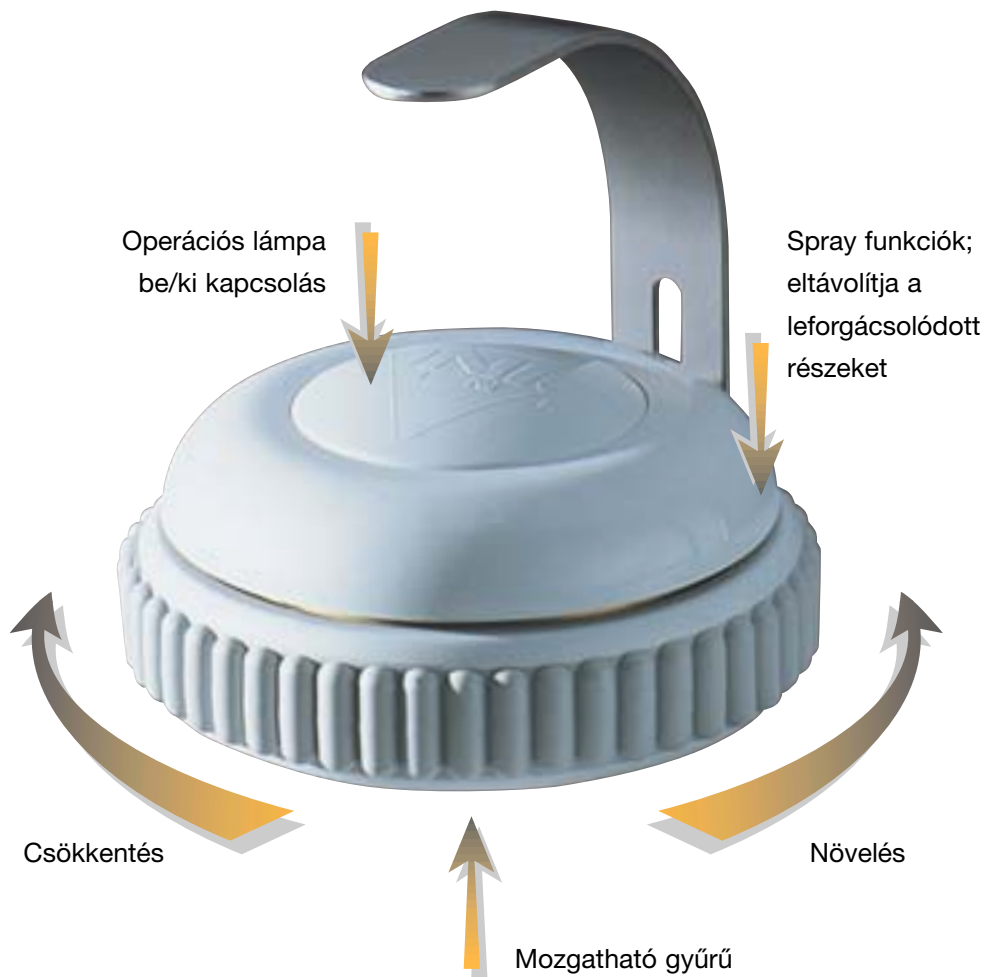

A UnicLine kapható hagyományos módon állítható lábkontrollal is.



LEGYEN NYITOTT
A LEHETŐSÉGEKRE
- MINDEN NAP

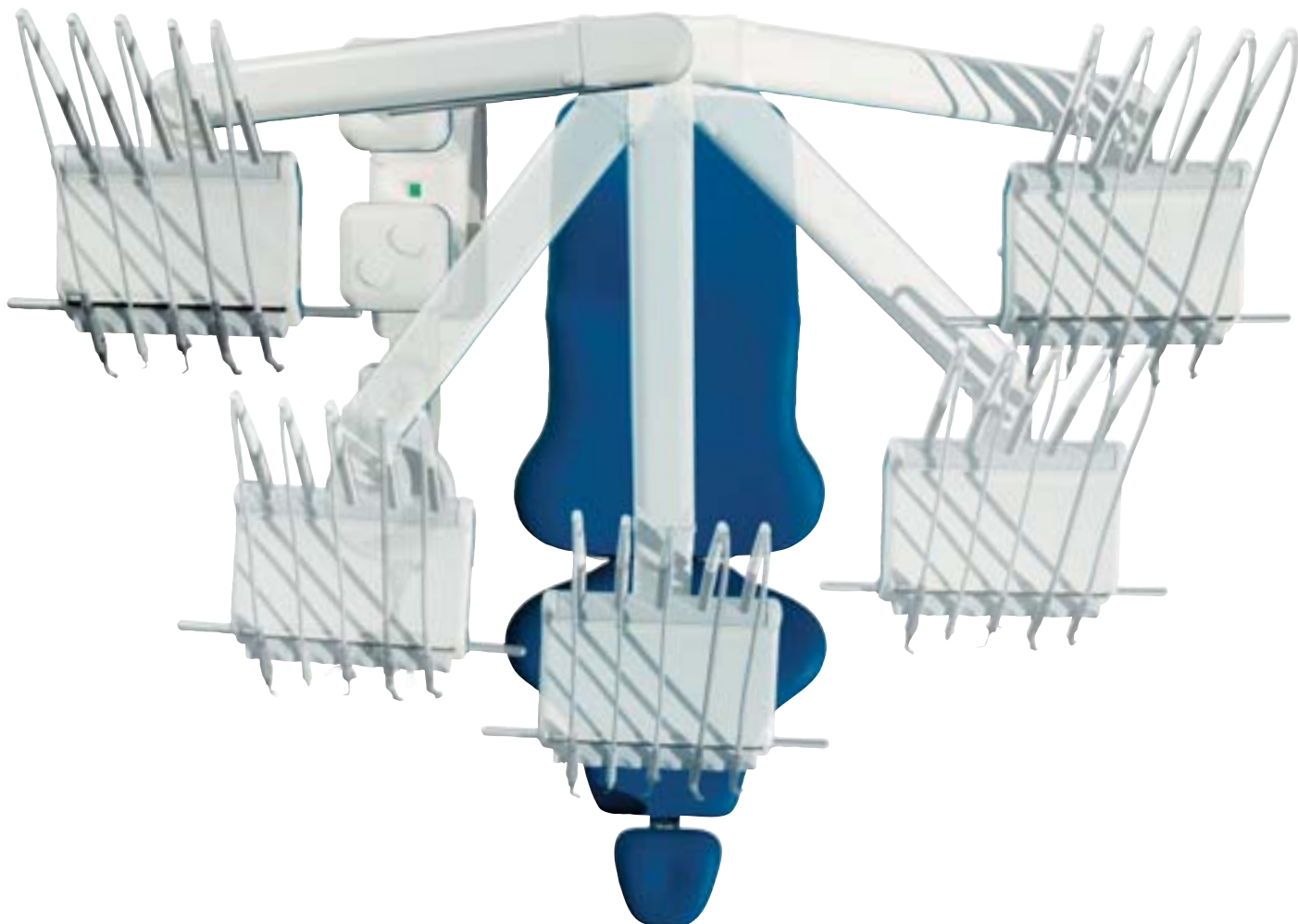



Kijelző

A multi-funkciós kijelző által egyszerűen áttekinthető, melyik műszer aktív.

Egyéni beállítások


A műszertartó dőlésszöge, minden műszer esetében egyedi módon állítható.

Opciuk széles választéka

A UnicLine 5D 3-6, a műszertartóra előlről vagy hátulról felszerelhető műszerrel kapható. Több mint 20 különböző műszer közül választhatunk. A műszerek minden funkciója vezérelhető a lábkapcsolóról.

Kézi vezérlés

A kisegítő funkciók billentyűi a műszerasztal oldalán helyezkednek el, ezek vezérlik az "idő" funkciót, a "fotopolimerizációs időt", az asszisztens hívót, a pohártöltő funkciót és a mikromotor-ellenőrzést.

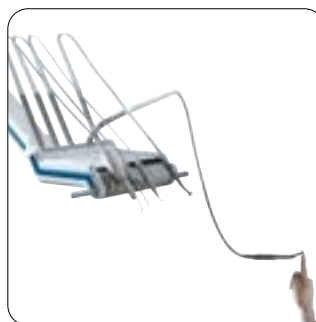


Ergonómia


Ezen a rugalmas modellen minden eszköz tökéletesen arányos; az extra hosszú szilikon csövek biztosítják az ergonomiailag megfelelő beállítás szerinti működést.

FLEXIBILIS ESZKÖZÖK
ALKALMAZÁSA A
FOGORVOSOK
EGYEDI IGÉNYEINEK
KIELÉGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN




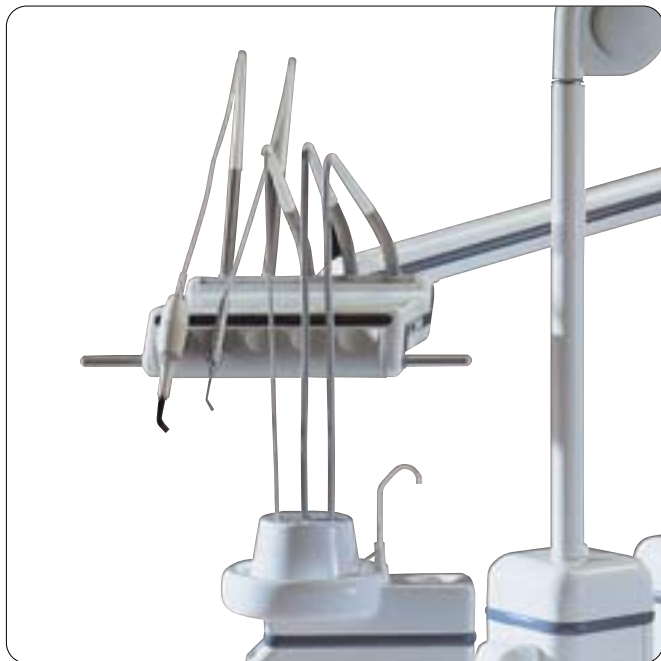

A könnyen eltávolítható
alumínium nyelek
autoklávozhatóak.

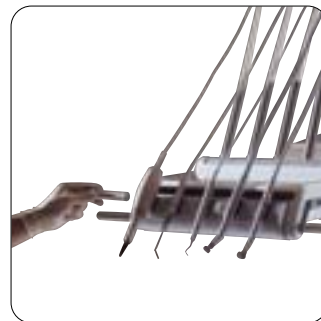

A tisztításhoz a
műszertartó könnyen
eltávolítható.

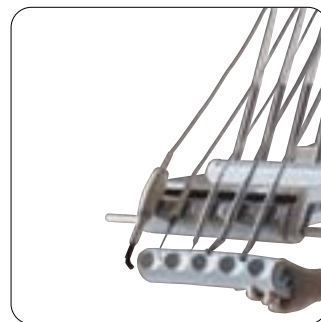


Öblítő rendszerek

A friss vízellátás
biztosítása érdekében a
UnicLine, egy automata
vízöblítő rendszer
segítségével juttatja el a
vizet a műszerekhez.

A vízcsatornák ürítése

A UnicLine higiénias rendszerrel
is felszerelhető; ebben az esetben
a víz kiürül a csövekből.
Ezen opció alkalmazását akkor
javasoljuk, ha a kezelőegységet
több mint két napja nem
használtuk.

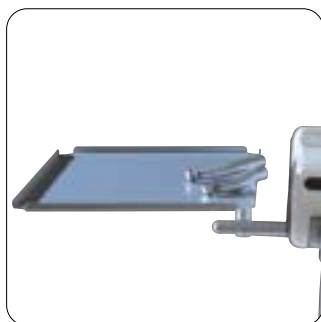

UnicLine 5D
- szimpla tálcával.
- dupla tálcával.
- röntgen monitorral.



MIÉRT ÉRNÉ BE BÁRMILYEN
ANYAGGAL, HA VÁIASZHAT
ALUMÍNIUMBÓL KÉSZÜLT
KEZELŐEGYSÉGET IS, AMELY
ÉLETRESZÓLÓ MINŐSÉGET
BIZTOSÍT



UnicLine multimédia
A monitorral felszerelt
UnicLine 5D hatékonyan
mutatja be a beteg
számára az intraorális
képeket, videókat, digitális
röntgen képeket vagy
más IT-médiát.



FLEXIBILIS MŰSZEREK





A UNICLINE 5D
- EGY KÖRNYEZET-
BARÁT, ELEGÁNS,
JÓL MŰKÖDŐ ÉS
IDŐTÁLLÓ
KONSTRUKCIÓ





A UNICLINE
ÁTALAKÍ-
THATÓ
JOBBS VAGY
BALKEZES
KEZEL-
ŐEGYSÉGGÉ



LÁMPA BEÉPÍTETT STABILIZÁ- TORRAL



A UnicLine lámpa egy
tökéletes kezelőlámpa.
A lámpatest egy rugalmas,
önegyensúlyozó karon
helyezkedik el, amely
biztosítja a lámpa stabil
helyzetét.

IGÉNY SZERINTI ELHELYEZÉS



Köpőcsésze

A szék oldalán elhelyezkedő köpőcsésze a UnicLine kezelőszékhez van erősítve. Ez egy elfordítható köpőcsésze elszívóval, plusz tálcaasztallal, operációs lámpával és flexibilis karral felszerelve.

A Cart típus ugyanazon funkciókat kínálja, mint a UnicLine 5D kezelőegység. A kezelőegység kemény alumíniumból készült, rejtett kerekkel. A műszerasztal magassága manuálisan állítható ülő és álló kezelésekhez egyaránt.



UnicLine Cart




UnicLine model: pillar

BETEG HIGIÉNYIA

A UnicLine 5D egy egyedülálló, automata szívótömlő- tisztító rendszerrel is kapható, amely egyszeri megnyomással aktiválható. A szívótömlők fertőtlenítődnek és kezdetét veheti egy új kezelés. A szívótömlők a beteg kezelése alatt is folyamatosan fertőtleníthetők.



A UnicLine 5D felszerelhető szabályozható szívószeleppel, vagy higiénikus alumínium szívószeleppel is.

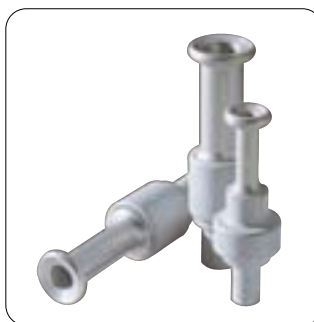



FLEXIBILI

A UnicLine 5D egy flexibilis, teleszkópos karral van felszerelve, amely az optimális működési pozícióba állítható, akár asszisztenssel, akár asszistens nélkül dolgozunk. Felszerelhető multifunkcionális pusztterrel, vagy polimerizációs lámpával.



KÉNYELEM

Az elfordítható köpöcsésze könnyen hozzáférhető, akár két asszisztens számára is. A köpöcsésze felső része könnyen eltávolítható.





Kartámasz

A UnicLine beteg szék egy, vagy két kartámasszal szerelhető fel.



Opciók

Egyéni beállítást tesz lehetővé számunkra és az asszisztens számára, a szék felemelésére szolgáló három-utas joy-stick, amely segítségével a szék megfelelő pozícióba állítható.



Easy to clean

The UnicLine upholstery is easy to dismount for cleaning.



OPCIÓK

The UnicLine patient chair is delivered with Soft upholstery in 9 different standard colours and as an option with SuperSoft upholstery in 4 different colours.

A BETEG KÉNYELMÉÉRT

A lábtámasz a háttámlához
hasonlóan dönthető, ezzel biztosítva
a beteg kényelmét a kezelés alatt.



ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMASZ

A kétféle pozícióba állítható
fejtámasz tökéletesíti mind a
gyermek, mind a felnőtt
beteg megfelelő
elhelyezkedését.



UNICLINE MOBILE - KOMPLETT KEZELŐEGYSÉG

Teljesen felszerelt mobil és
rögzíthető kezelőegység.



Műszerasztal két monitorral,
3 funkcionális szívóval, mérleggel
és polimerizációs lámpával.
A kezelőszekrény tartalmaz amalgám
szeparátort, egy kompresszort és
a friss víz kivezetéséhez
szükséges szeparátor tartályt.
230 VAC -ot igényel.



KEZELŐEGYSÉG,
MÚSZERASZTAL,
LÁMPA, SZÉK ÉS
RÖNTGEN



heka*dental*

További információkért forduljon hozzánk bizalommal.



Heka Dental ApS
Baldershøj 38 á
DK-2635 Ishøj á Denmark
Telefon +45 43 32 09 90 á
Fax +45 43 32 09 80
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.dk

Magyarországi Kizárólagos Forgalmazó:



MediCINE School

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
4700 Mátészalka, Szatmár u. 59, Hungary
Tel.: + 36 44 500 640, Fax: + 36 44 500 649
E-mail: sandor.micskei@szatmarmedical.com
www.szatmarmedical.com

A technikai és
színbeli változások
joga fenntartva.