

Wytyczne higieniczne

HEKA

Opracowane w celu utrzymania higieny

Unit Heka S+ zaprojektowano tak, aby był możliwie najbardziej higieniczny i łatwy do czyszczenia. Zawdzięcza to przemyślanym rozwiązaniom, takim jak zastosowanie powierzchni ze szkła hartowanego, którego twarda i gładka powierzchnia szczególnie nadaje się do czyszczenia i dezynfekcji. Zintegrowany wyświetlacz dotykowy eliminuje przyciski/przełączniki, gdzie mógłby się zbierać kurz i brud.

Ogólne czyszczenie powierzchni

Wszystkie powierzchnie unitu są wykonane z malowanego proszkowo aluminium lub szkła hartowanego. Wyświetlacz można oczyścić zablokować na czas czyszczenia, po 2 minutach odblokuje się automatycznie i unit będzie ponownie gotowy na przyjęcie kolejnego pacjenta.

Wszystkie punkty kontaktu - uchwyty oraz stolik na instrumenty - można łatwo zdjąć do czyszczenia i sterylizacji. Dotyczy to również uchwytów lampy zabiegowej.



Automatyczne płukanie instrumentów

Wydajne płukanie układu wodnego unitu i węży instrumentów to podstawa przeciwdziałania tworzeniu się biofilmów. Automatyczne płukanie instrumentów

ułatwia szybkie i wydajne przemycanie węży instrumentów codziennie i pomiędzy kolejnymi pacjentami.

Łatwo uruchamia się płukania spłuwaczki po płukaniu instrumentów, aby przemycać także i tę część układu wodnego.



Układ czyszczenia ślinociągu

Przy pracy automatycznego ślinociągu na końcu węży układu uruchamia się dysza, która czyści w sposób ciągły układ ślinociągu przy użyciu środków chemicznych lub tylko czystej wody, co pomaga utrzymać cały układ ślinociągu w pełnej czystości i sprawności.

Płukanie przy użyciu środków chemicznych lub tylko czystej wody można uruchamiać podczas zabiegu.

Zapewnia to skuteczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń, zanim zaschną, co pozwala zapobiec ich zestalaniu się wewnątrz węży.

Regularne płukanie aktywnymi środkami chemicznymi pomiędzy pacjentami lub po zakończeniu dnia pracy może zapewnić ograniczenie gromadzenia się jednostek tworzących kolonię, drobnoustrojów i bakterii w układzie ślinociągu.



Misa spłuwaczki/zawór spłuwaczki/ewentualnie separator amalgamatu

Zapewnia wydajny przepływ wody z układu spłuwaczki. Separator amalgamatu umożliwia

usuwanie amalgamatu z wody ze spłuwaczki.

Misę spłuwaczki można łatwo zdjąć do czyszczenia.



Aktywne oczyszczanie wody

Po uruchomieniu aktywnego oczyszczania wody do układu wodnego unitu będzie dozowany w sposób ciągły aktywny środek czyszczący, aby ograniczyć ilość nagromadzonych bakterii oraz uniknąć tworzenia się biofilmu.

Układ oczyszczania wody jest do nabycia w dwóch wariantach - z zatwierdzonym przez DVGW systemem izolacji instalacji wody pitnej lub bez takiej izolacji.



Procedury czyszczenia unitu


Przed rozpoczęciem dnia pracy

- Płukanie instrumentów w trybie automatycznym - długi program.
- Płukanie ślinociągu w trybie automatycznego czyszczenia (lub poprzez zassanie środka czyszczącego).



Pomiędzy kolejnymi pacjentami

- Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni oraz węży instrumentów, w tym uchwytów i tapicerki fotela.
- Szybkie płukanie instrumentów w trybie automatycznym.
- Płukanie układu ślinociągu przy użyciu aktywnych środków chemicznych do dezynfekcji wewnętrznej - uchwyty układu czyszczy się zatwierdzonym środkiem dezynfekującym i wyciera do sucha.

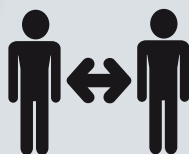


Po zakończeniu dnia pracy

- Płukanie układu ślinociągu aktywnymi środkami chemicznymi. Uchwyty ślinociągu zdejmuje się czyścić zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w danym gabinecie.
- Sprawdzenie i czyszczenie filtrów w węzach ślinociągu
- Zdejmowanie uchwytów i stolika na instrumenty - czyszczenie ich i sterylizacja zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym gabinecie.



Inne (według potrzeb)

- Sprawdzenie czystości, a w razie potrzeby ponowne użycie środków chemicznych do czyszczenia ślinociągu i/lub aktywnego oczyszczania wody.
- Sprawdzenie, a w razie potrzeby oczyszczenie filtra zaworu/spustu spluwaczki.
- Wymiana pojemnika z amalgamatem, jeśli się napełni.

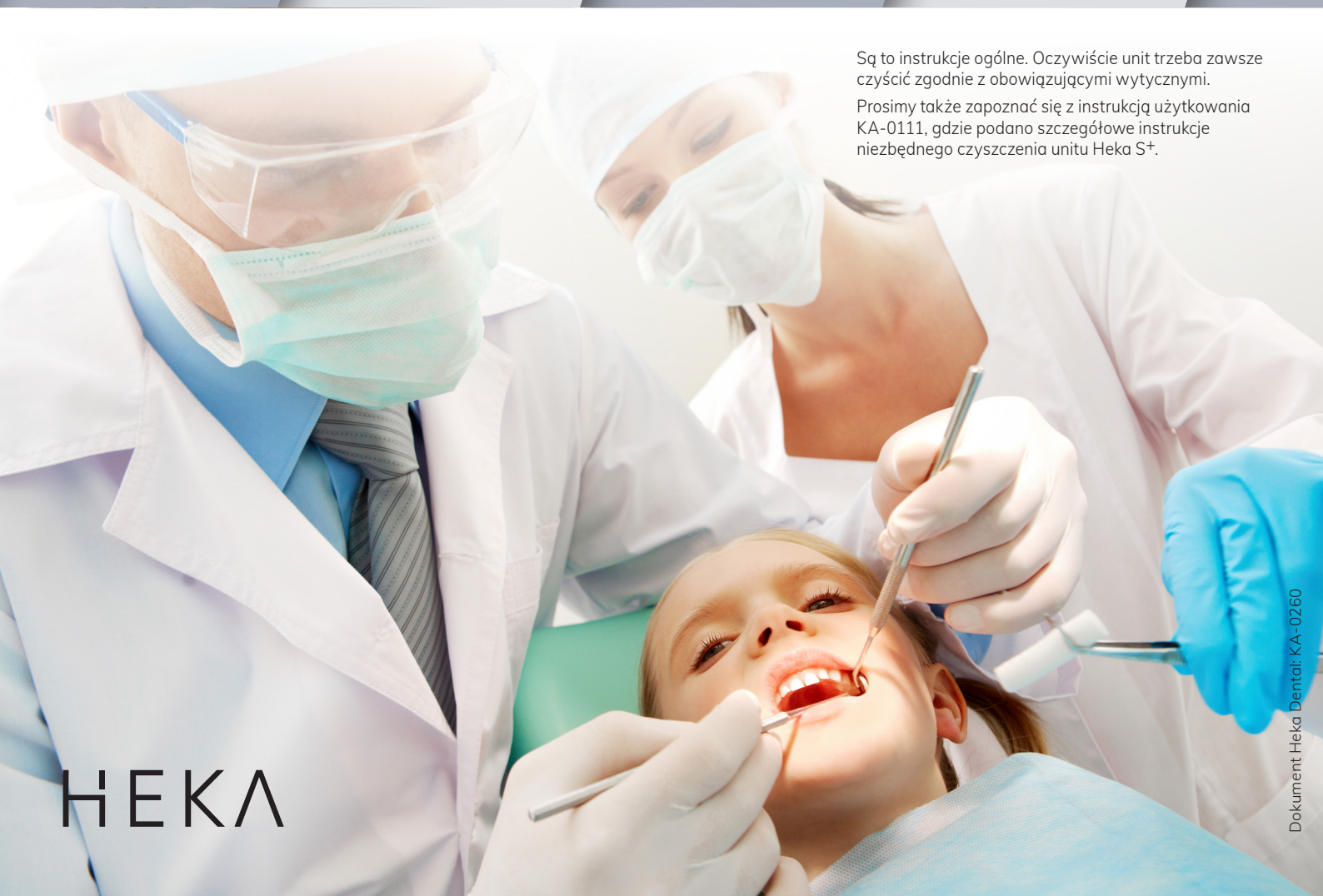

Są to instrukcje ogólne. Oczywiście unit trzeba zawsze czyścić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Prosimy także zapoznać się z instrukcją użytkowania KA-0111, gdzie podano szczegółowe instrukcje niezbędnego czyszczenia unitu Heka S⁺.

HEKA